

## 行政院衛生署 書函

機關地址：104台北市中山區林森北路80號  
傳 真：(02)25237318  
聯絡人及電話：邱巖之(02)85906889  
電子郵件信箱：pacyc@doh.gov.tw

104



台北市建國北路二段87號10樓之一

受文者：中華民國西藥代理商業同業公會

發文日期：中華民國98年12月10日  
發文字號：衛署藥字第0980036417號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

主旨：GDH-PQQ血糖試紙可能干擾患者血糖測量，造成血糖檢測值偏高，尤其當洗腎患者搭配使用某些治療藥物時，可能導致血糖數值判斷錯誤，嚴重時可能導致病患昏迷或死亡等不良事件，請貴會轉知會員注意，請 查照。

說明：

- 一、復 台中市醫療器材商業同業公會98年12月4日中市醫材獎九字第017號函。
- 二、根據美國FDA近年來統計研究指出，血糖試紙相關致死案例中，數件報告GDH-PQQ檢測方法之血糖試片，因試片無法分辨葡萄糖與其他糖類，如maltose, xylose或galactose等，而干擾患者血糖測量，造成血糖檢測值偏高的現象。尤其當洗腎患者合併某些藥物治療時，可能導致血糖數值判斷錯誤而錯失治療時機，嚴重時將可能導致病患昏迷或死亡。本署亦已於96及97年間陸續發布新聞，提醒醫護人員及一般使用者注意。
- 三、攜帶型血糖儀所使用之血糖試片通常可分為Glucose Oxidase、Glucose Dehydrogenase等原理，並再以其Co-enzyme細分為